

AED SAFETY BOX

Safe storage. Easy access.

INSTRUKCJA OBSŁUGI



1.a) Odkręć uchwyt od wewnątrz i przykręć ponownie na zewnątrz drzwi.
dla modeli: ASB1000, ASB1010, ASB1020.



1.b) Szafki zamykane na klucz mają drugi klucz w środku szafki.
dla modeli: ASB1001, ASB1011, ASB1021



2. Aby aktywować alarm, usuń taśmę zabezpieczającą **pociągając ją w dół**.
tylko dla modeli z alarmem (dźwiękowym i/lub świetlnym): ASB1010, ASB1011, ASB1020, ASB1021

UWAGA: Podczas transportu może dojść do przemieszczenia baterii. Jeśli alarm nie zostanie aktywowany po wykonaniu kroku 2, należy przejść do kroku 3, aby wyjąć baterie i umieścić je z powrotem.



3. Aby wymienić baterię (3 x AAA), **odkręć i wyjmij** kieszeń z alarmem.
tylko dla modeli z alarmem (dźwiękowym i/lub świetlnym): ASB1010, ASB1011, ASB1020, ASB1021

WAŻNE INFORMACJE:

1. Szafka zaprojektowana jest do **użytku tylko wewnątrz budynku**.
2. Drugi klucz (punkt 1.b)) powinien być zawsze w posiadaniu osoby odpowiedzialnej za dostęp AED w danym dniu.
3. Po aktywacji alarmu (punkt 2), alarm świetlny i dźwiękowy włącza się po otwarciu drzwiczek.
4. Szafka powinna zostać zamocowana do ściany za pomocą śrub o średnicy minimum 8 mm.

PRODUCENT:
AGM Łabza sp. z o.o.
Balicka 116B lok. G
30-149 Kraków

www.AEDsafetyBox.com

 **INTEGRA
MEDICAL**