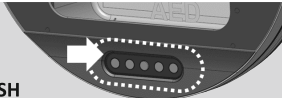
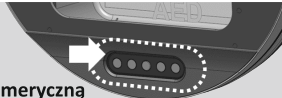


6. Jak zmienić hasło oraz tryb szafki

※ **UWAGA:** Domyślnie wszystkie nowe szafki jako bieżące hasło mają **1234** i są w **TRYBIE ZABLOKOWANYM**. Zdecydowanie zalecamy zmianę hasła.

Dla Szafek w trybie ODBLOKOWANYM (otwieranie bez kodu)	Dla Szafek w trybie ZABLOKOWANYM (otwieranie za pomocą kodu)
Aby zmienić aktualne hasło: - naciśnij „OK” i otwórz drzwi szafki - naciśnij przycisk „SET” - wprowadź aktualne hasło - naciśnij „OK” - wprowadź nowe hasło - naciśnij „OK” - wprowadź nowe hasło - naciśnij „OK” i zamknij drzwi szafki	Aby zmienić aktualne hasło: - wprowadź aktualne hasło - naciśnij „OK” - otwórz drzwi szafki - naciśnij przycisk „SET” - wprowadź aktualne hasło - naciśnij „OK” - wprowadź nowe hasło - naciśnij „OK” - wprowadź nowe hasło - naciśnij „OK” - zamknij drzwi szafki
Aby zmienić tryb szafki z ODBLOKOWANY na ZABLOKOWANY: - naciśnij „OK” i otwórz drzwi szafki - naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski „SET” i „OK” przez 3 sekundy - sprawdź, czy na wyświetlaczu pojawi się „0-NE” - wprowadź aktualne hasło i naciśnij „OK” - zamknij drzwi szafki	Aby zmienić tryb szafki z ZABLOKOWANY na ODBLOKOWANY: - wprowadź aktualne hasło - naciśnij „OK” - otwórz drzwi szafki - naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski „SET” i „OK” przez 3 sekundy - sprawdź, czy na wyświetlaczu pojawi się „0-NE” - wprowadź aktualne hasło i naciśnij „OK” - zamknij drzwi szafki
 Przyklej naklejkę PUSH na panelu klawiatury	 Przyklej naklejkę numeryczną na panelu klawiatury

7. Rozwiązywanie problemów (kody błędów)

Kod błędu	Co należy zrobić
E—01 Blokada zamka próbowała się podnieść / odblokować, ale nie udało się otworzyć szafki.	Sprawdź, czy na drodze drzwiczek nie ma żadnych przeszkód lub czy nie są zalokowane mechanicznie.
E—02 Blokada zamka próbowała się opuścić / zablokować, ale nie udało się zamknąć szafki.	Sprawdź, czy nie ma przeszkód lub czegośkolwiek, co mogłoby blokować zamknięcie drzwiczek.
E—03 Przycisk został naciśnięty więcej niż 8 razy, bądź się zablokował.	Sprawdź, czy przycisk nie jest z jakiegoś powodu zablokowany lub czy nie jest uszkodzony.
E—05 Blokada zamka jest opuszczona / zablokowana, ale czujnik nie wykrywa drzwiczek.	Sprawdź, czy w pobliżu zamka szafki nie ma źródła magnetycznych zakłóceń lub czy zamek nie jest uszkodzony lub zanieczyszczony.



www.defibsafe.co.uk

1. Przegląd produktu

- **Zewnętrzna dioda LED:** szafka zamknięta (zielony) / otwarta (czerwony).
- **Oświetlenie wewnętrzne:** automatyczne włączanie/wyłączanie (czujnik zmierzchu).
- **Wyświetlacz:** 🌡️ temperatura 💧 wilgotność 🔒 szafka zamknięta 🔓 szafka otwarta
- **Alarm dźwiękowy:** alarm jest aktywowany po otwarciu drzwi.
- **Klawiatura numeryczna:**
 - dla szafek w trybie zablokowanym:
wprowadź 4-cyfrowe hasło i naciśnij przycisk „OK” aby odblokować i otworzyć szafkę.
 - dla szafek w trybie odblokowanym:
naciśnij przycisk „OK” aby odblokować i otworzyć szafkę.
- **System kontroli temperatury:**
 - ogrzewanie: działa, gdy temperatura wewnątrz szafki spadnie poniżej 5°C.
 - chłodzenie: działa, gdy temperatura wewnątrz szafki przekroczy 30°C.

2. Specyfikacja produktu


- **Rozmiar:**
 - zewnętrzne: średnica: 52 cm, głębokość: 22 cm,
 - wewnętrzne (wnęka na AED): szerokość: 32 cm, wysokość: 34 cm, głębokość: 13-15 cm
- **Waga:** korpus ok. 5,5 kg, wspornik ok. 1,5 kg lub mniej.
- **Zasilanie:** 100 — 240V.
- **Materiał:** korpus: ABS + poliwęglan, wspornik: żelazo.
- **Adapter:** wejście: 100 - 240V 50/60Hz 1,5A, wyjście: 12V - 5,0A.

3. Instrukcja użytkowania



- **Otwórz kapsułę:**
 - tryb odblokowany (bez kodu): naciśnij „OK” i otwórz drzwi szafki.
 - tryb zablokowany (z kodem): wprowadź hasło, naciśnij „OK” i otwórz drzwi szafki.
- Po otwarciu szafki zewnętrzna dioda LED zaświeci się na czerwono i włączy się alarm dźwiękowy.
- **Odepnij opaskę**, aby wyciągnąć AED w celu jego do użycia.
- Gdy defibrylator AED jest gotowy do ponownego umieszczenia w kapsule, należy użyć opaski, aby zamocować go z powrotem na miejscu, a następnie należy zamknąć drzwiczki szafki.


4. Komponenty w zestawie

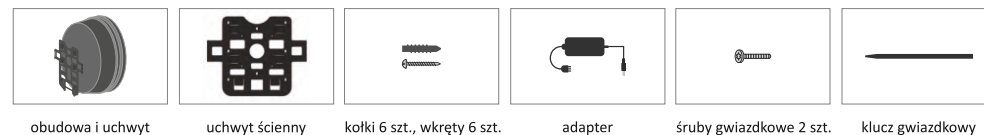

5. Wytyczne dotyczące instalacji


Montaż uchwyty ściennego:

1. Przyłóż wspornik do ściany (zalecane minimum 90 cm od podłogi do podstawy szafki) i upewnij się, że jest wypoziomowany.
2. Używając wspornika jako szablonu, zaznacz miejsca, w których należy wywiercić sześć otworów.
3. Wywierć otwory wiertłem o średnicy 8 mm na głębokość co najmniej 45 mm.
4. Włóż kołki rozporowe i użyj sześciu wkrętów, aby przykręcić wspornik do ściany.

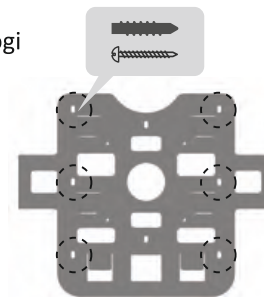

Montaż szafki:

1. Przymocuj cztery tylne haki obudowy do rowków wspornika ściennego.
2. Przymocuj połączenia wspornika po lewej/prawej stronie za pomocą dołączonych śrub gwiazdkowych i klucza (w celu zabezpieczenia przed kradzieżą).

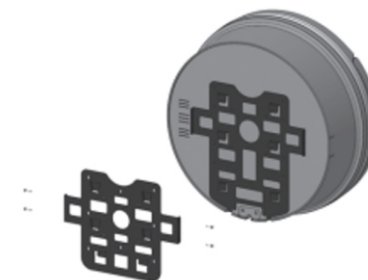

Podłączenie zasilania:

W razie potrzeby wywierć otwór na przewód zasilający, aby przeprowadzić go przez ścianę, a następnie podłącz przewód zasilający do źródła zasilania.

- ※ **OSTRZEŻENIE** - Nie należy podejmować prób instalacji elektrycznej DefibSafe 3, jeśli nie jest się wykwalifikowanym elektrykiem. Może to spowodować obrażenia ciała użytkownika lub innych osób.
- ※ **SPRAWDŹ** zewnętrzne podświetlenie LED, stan wyświetlacza i stan sygnału ostrzegawczego po podłączeniu do zasilania.
- ※ **UPEWNIJ SIĘ**, że transformator, okablowanie i złącza w żaden sposób NIE SĄ narażone na działanie czynników zewnętrznych.